



TOKYO DAIYO CO.,LTD.

高 き HIGHプTECHNOLOGY

医療機器は古代より様々な形をとってきました。 それはテクノロジーのおおいな る進歩であり、 人類の生命尊厳の歴史でもあります。

1800年代から医療機器に果敢に挑戦してきた『東京ダイヨー』。私たちは、永き歴史を背負って、医療機器の研究開発に尽力してきました。直線から曲線にいたる"ダイカ"の縫合針のフォルムは100年、まさしく1世紀の歴史を誇るものです。その伝統は、医療技術を支える重要な役割を果たし、多くの生命に関与したと自負しています。

そして今また、1世紀を超える伝統とハイテクノロジーによって、新たに医療機器が生みだされようとしています。



"ダイカ"スーパー縫合針

- 針先の研磨や孔部(バネ・並とも)加工が秀れており、針全体がなめらかで、かつ曲がりにくい構造となっています。角針・丸針とも切れ味・腰の強さ・滑りの良さは、最高品質です(・・・・・人体組織損傷度が少なく、糸切れ等もありません)。
- 最新技術・機械によるオートメーション生産により、刺通性能・強度レベルが高く均一性のとれた針生産を行っています。
- 使用目的に合わせた豊富な種類形態が揃っています。 スーパー(10本入 / ビニールケース ×12)(Fig.1)、セット、S・P タイプ等。

"ダイカ"スーパー縫合針セットの特長








- ●病院での各手術や Dr. の仕様に応じたオリジナルセットを組むオーダーメイドのセット針です。
- "ダイカ"スーパー縫合針をご指定通りに組み合わせ、1セットずつ滅菌バッグ包装いたします。
- ●硬質特殊基板の採用により針の抜き取りが、たやすく安全に行なえ、術野作業の能率化・迅速化に役立ちます。
- ●縫合針は、硬質特殊基板にセットされていて、片手で持ち、右側中程に指先をかけ、軽く絞るようにすれば、中央部が浮上します。直接持針器で1本ずつ自由に取り出せ、他の針の列を乱しません。(Fig.2)
- ●硬質特殊基板の左側を折り曲げてカバーとし、針先の保護と取扱上の安全を確保しました。
- ●硬質特殊基板には、セットされている縫合針の種類・手術の種類(術名称)・病院名・製品登録番号などが記載されますので、保管管理及び発注作業がスムーズに行なえます。
- ●コンピュータを使った生産のオートメーション化・・・・・・自動生産システムにより、大量に均一性の高い製品をお届けできます。
- ●手術に際し、硬質特殊基板の片手保持に不都合のあるときは、手近に置いて使える小型の専用スタンド(ステンレス製)のご用命も承ります。(Fig.3)
- ●セットの種類別に10~50セットずつ専用箱に収納の上、納品いたします。(Fig.4)
- ※滅菌バッグ包装の製品は、必ず滅菌処理の上、ご使用ください。それぞれの使用量に応じて自由に滅菌できます(E・O・G、オートクレーブのどちらでも可)ので長期保管ができ、無駄がありません。
- ※ご希望により、滅菌済(E・O・G)にての納品も可能です。

"ダイカ"スーパー SP タイプ縫合針の特長




- ●1 本ずつ、あるいは2本ずつ・3本ずつ滅菌バッグで包装した縫合針です。
- ●必要に応じて適量をご使用できます。タイプ、サイズ等は、1包ごとに印刷明示してあるので、 取り違えもありません。
 - 1 本ずつタイプ (SP-1) は、4~5 本(包)連続シート状になっています。
 - ご使用になる本数のみ切り離してご利用になれます。
 - 100本(包)ずつ専用箱入りになっています。(Fig.5)
- ●ご使用のときは、(Fig.6)のように開封し、直接持針器で取り出してください。
- ●針先部は、2 重フィルムで保護されていますので、取扱中、ピンホール等による汚染の心配がありません。また、開封しない限り長期保管及び随時使用ができ、全く無駄がありません。 再滅菌された場合でも、品質に変化がありません。
- ●SPタイプは、中央材料滅菌室等にても各科からの要求に直ちに対応でき、安全性と取扱いの便利さも喜ばれています。
- ※手術件数が多い場合は、"ダイカ"スーパー縫合針セットとのご併用をおすすめいたします。




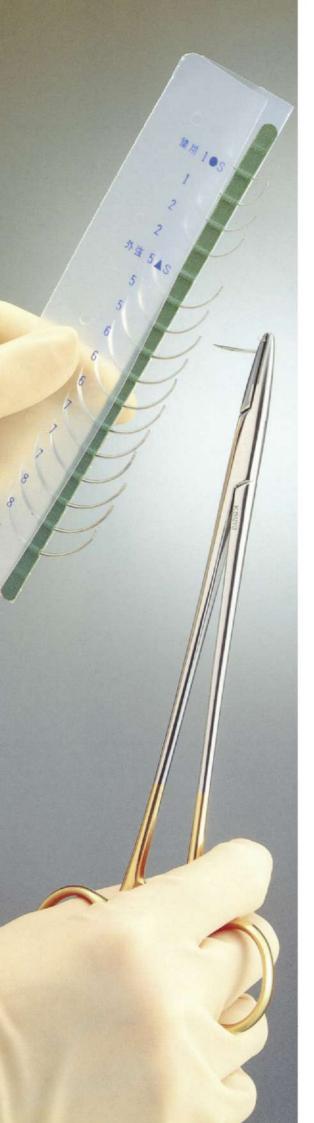

"ダイカ"スーパー縫合針セット

省力化の推進に"ダイカ"のユニークな製品を!!品質·価格·便利さ·使い易さ——4拍子そろった滅菌バッグ入り組み合わせ縫合針。

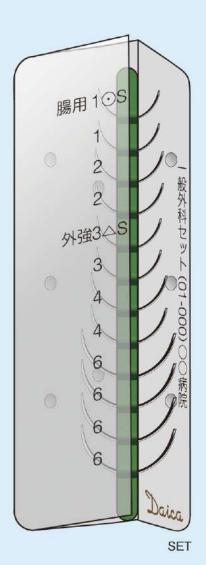

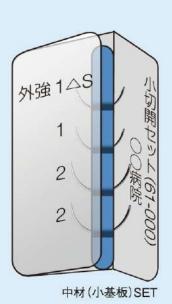

■SET

"ダイカ"スーパー縫合針セットは、安全で取扱い便利な硬質特殊基板にご指定通りの組み合わせをいたします。また、中央材料減菌室等でのご利用が多い2~5本の小基板セットもご好評をいただいております。

- ●ご指定縫合針の組み込み・印字記載・材料等の経費は、無料にてメーカーがお引受けいたしております。
- ●各手術 (Dr.)対応の組み合わせ内容をご指定いただければ、すぐ 試用できるサンブルの提供をさせていただきます。

"ダイカ"スーパー SPタイプ縫合針




SP-1タイプは、連続自動包装で1本ずつ 滅菌バッグに入っており、1シート4~5本で切り離し自由なミシン目入りです。

手術部でセットの緊急補充用として、また 中材部では各科の要求に即応しますので 救急用に最適です。





SP-2, SP-3 タイプとも滅菌バッグ包装の 2本入・3 本入です。

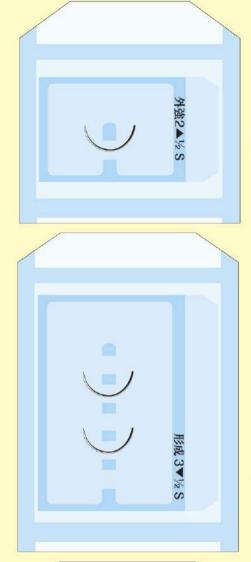


SPW-1

SPW-1は、滅菌バッグ 《2重包装》で各タイプ、 サイズ共1本入です。



SPW-2は、滅菌バッグ 《2重包装》で各タイプ、 サイズ共2本入です。

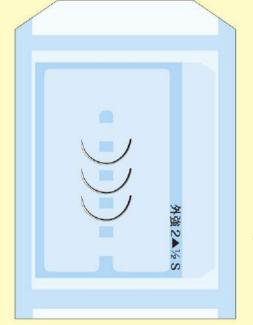


SPW-3

SPW-3は、滅菌バッグ 《2重包装》で各タイプ、 サイズ共3本入です。


"ダイカ"スーパー SP タイプ縫合針は、すべて滅菌バッグ包装になっておりますので、そのままオートクレーブ、あるいは E.O.G で滅菌処理の上ご使用ください。※ご希望により滅菌済(E.O.G)にての納品もお受けいたします。

"ダイカ"スーパー縫合針(原寸図)

外科用強弯角針 Surgical Suture Needle 1/2 circle Standard cutting edge

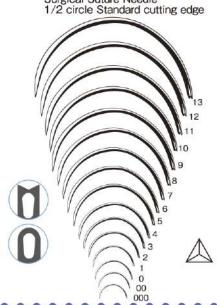


5 外科用角直針 Surgical Suture Needle Straight Standard cutting edge

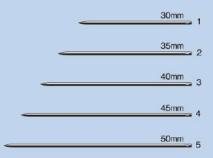



8 腸用丸針

2 外科用強弯丸針 Surgical Suture Needle 1/2 circle Taper Point

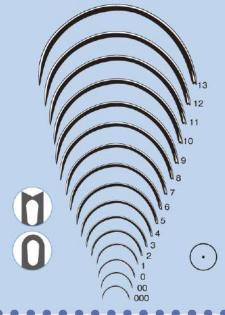

6 腸用直丸針


Intestinal Suture Needle Straight Taper Point

	35mm
	43mm
-	50mm
	60mm






9 腸用弱弯針 Intestinal Suture Needle 3/8 circle Taper Point

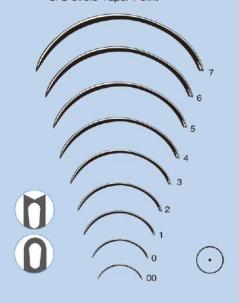

3/4 外科用弱弯角·丸針

Surgical Suture Needle 3/8 circle Standard cutting edge 3/8 circle Taper Point

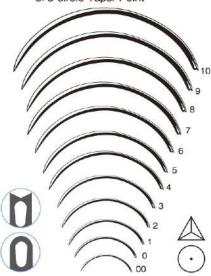

7 手掌用強弯角針

Needle for Palm 1/2 circle Standard cutting edge (Wire use)









10婦人科用角針

Gynecological Suture Needle 4/9 circle Standard cutting edge



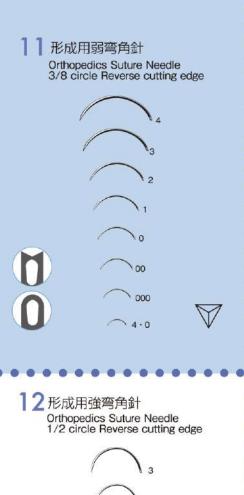

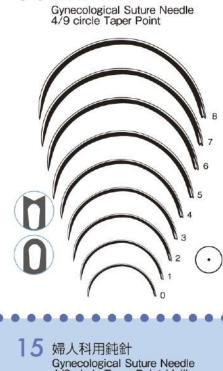

14 婦人科用丸針




17 眼科用丸針

Ophthalmic Suture Needle 3/8 circle Taper Point


10


00

000

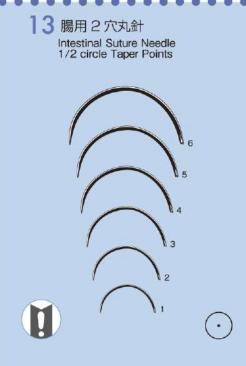

000

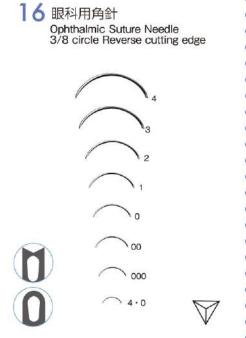

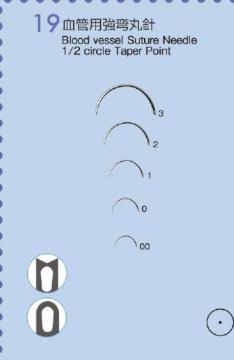

"ダイカ"スーパー縫合針計測表

MEASURE MENT LIST

Cat No.	サイズ (SIZE)	針径 (<i>ф</i>)	全長 (L)	円弧直径	Cat No.	サイズ (SIZE)	針径 (<i>p</i>)	全長 (L)	円弧直径	Cat No.	サイズ (SIZE)	針径 (ø)	全長 (L)	円弧直径	
外科用弱弯 角・丸					腸用弱弯 丸					血管弱弯 丸					
3/4	00	0.60	17	13.9	9	00	0.50	15	12.3	18	000	0.40	7	5.7	
	0	0.70	21	17.2		0	0.60	18	14.8		00	0.40	9	7.4	
	1	0.75	25	20.5		1	0.60	23	18.9		0	0.40	11	9.0	
	2	0.85	29	23.7		2	0.65	28	23.0		1	0.40	14	11.5	
	3	0.85	33	27.0		3	0.75	33	27.0		2	0.40	19	15.6	
	4	0.95	37	30.3		4	0.80	38	31.2		3	0.40	24	19.7	
	5	1.05	41	33.6		5	0.90	43	35.3						
4	6	1.15	45.5	37.3		6	1.00	48	39.5		形成	战強弯 角	Ì		
1	7	1.15	49	40.0		7	1.05	53	43.5	12	000	0.50	9	5.8	
	8	1.25	52	42.6							00	0.50	11	7.0	
	9	1.35	56	46.0		腸用	強弯す	լ			0	0.50	13	8.3	
	10	1.35	61	50.0	8	000	0.50	13	8.3		1	0.60	15	9.5	
	外科用	強弯 角	・丸			00	0.50	15	9.5		2	0.60	18	11.5	
1	000	0.50	11	7.0		0	0.60	18	11.5		3	0.60	21	13.3	
	00	0.50	13	8.3		1	0.60	23	14.6						
	0	0.60	15	9.5		2	0.65	28	17.8		手	手掌用 角			
	1	0.60	17	10.8		3	0.75	33	21.0	7	0	0.60	14	8.9	
	2	0.70	21	13.3		4	0.80	38	24.2		1	0.60	17	10.8	
	3	0.75	25	15.9		5	0.90	43	27.3		2	0.65	23	14.6	
	4	0.85	29	18.5		6	1.00	48	30.5		3	0.75	28	17.8	
	5	0.85	33	21.0		7	1.05	53	33.8		4	0.80	33	21.0	
	6	0.95	37	23.6		8	1.15	58	36.9		外科用 直·角				
10 14	7	1.05	41	26.0							1	0.60	30	-	
	8	1.15	45.5	29.0	眼	科 角・	丸 形成	弱弯 角			2	0.60	35	-	
	9	1.15	49	31.2	1 1	4 • 0	0.40	7	5.7	9	3	0.60	40		
	10	1.25	52	33.0	16 17	000	0.50	9	7.4		4	0.70	45	==	
	11	1.35	56	35.7		00	0.50	11	9.0		5	0.70	50	_	
	12	1.35	61	38.9		0	0.50	13	10.7		腸用 直・丸				
	13	1.35	65	41.4		1	0.60	15	12.3	6	1	0.60	35	=	
	婦人科	角・丸	・鈍			2	0.60	18	14.8		2	0.60	43	_	
	0	0.95	26	18.2		3	0.60	21	17.2		3	0.60	50	_	
	1	1.05	31	21.7		4	0.60	24	19.7		4	0.70	60	-	
	2	1.05	36	25.2		血管強弯 丸			腸用 2ツ穴丸						
	3	1.05	41	28.7	19	00	0.40	9	5.7	13	1	0.60	23	14.6	
	4	1.15	45.5	31.9		0	0.40	11	7.0		2	0.65	28	17.8	
	5	1.25	52	36.4		1	0.40	14	8.9		3	0.75	33	21.0	
1 5	6	1.35	56	39.2		2	0.40	19	12.0		4	0.80	38	24.2	
15	7	1.35	61	42.7		3	0.40	24	15.3		5	0.90	43	27.3	
	8	1.35	65	45.5				/			6	1.00	48	30.5	



"ダイカ"スーパー縫合針

販売元

東京ダイヨー株式会社

〒130-0012 東京都墨田区太平1-29-4 TEL.03(6240)4785(代) FAX.03(6240)4786

製造販売元 松田医科工業株式会社 東京都文京区湯島2丁目13番4号

管理医療機器

管理医療機器